



## ELETRODO DESCARTÁVEL LIVE

ANVISA: 80630319001

Fabricante: SHANGAI INTCO ELECTRODE MANUFACTURING CO.  
CHINA, REPUBLICA POPULAR

### Descrição

O Eletrodo Descartável ECG Live, foi desenvolvido para verificação das ondas elétricas do coração na realização de eletrocardiograma, para fins diagnósticos, terapêuticos, incluindo monitoramento dinâmico e eletrocardiograma de repouso como um meio condutor entre o paciente e o equipamento de diagnóstico para aplicação em curto ou longo prazo.

### Indicação de uso

O eletrodo Descartável Live, é um acessório para fins diagnósticos, monitoramento de ECG, não estéreis, destinados a uso único na pele intacta (não lesionada), são usados para captar sinais do paciente em conjunto com equipamento de monitoramento.  
O Eletrodo Descartável ECG Live, é indicado especialmente para setores de imagem, diagnóstico, monitorização e ECG, proporcionando alto desempenho.

### Composição

- Com adesivo de aderência eficiente para aplicações de longa duração;
- Capa plástica que mantém a umidade do gel;
- Fabricado em espuma de alta densidade;
- Sensor Ag/AgCl – Revestido no plástico ABS: (Estireno + Butadieno + Acrilonitrila) Revestido com prata + Cloreto de prata;
- Pino de aço inoxidável;
- Gel condutor sólido;
- Espuma com gel adesivo hipoalérgico.

### Instruções de uso

- Verifique as condições da embalagem do produto e a validade. Em caso de danos visíveis não utilize;
- Escolha o local de utilização sem e higienize a pele do paciente;
- Certifique que a pele esteja limpa, seca e sem lesões ou ulcerações. Se necessário realize a tricotomia da região a ser aplicado o eletrodo.
- Conecte o cabo de conexão do aparelho com o eletrodo e remova a capa protetora;
- Posicione o eletrodo na pele do paciente, já preparada. Pressionar o centro e ao redor das bordas laterais para melhor fixação.
- Após terminado o procedimento, desconecte o eletrodo e o remova delicadamente, evitando ferimentos à pele;
- Após o uso, descarte em local apropriado. Produto de uso único.

### Precauções

- Não aplicar os eletrodos sobre os mamilos, proeminências ósseas, pele lesionada ou com ulcerações;
- Proibido reprocessar e/ou reaproveitar sob hipótese alguma devido a perda de funcionalidade e integridade;
- Não utilizar caso o gel esteja seco/ressecado;
- Utilizar apenas o produto íntegro e no prazo de validade;
- Não utilizar em procedimentos de ressonância magnética;
- Em cirurgias, utilize longe das incisões para evitar possíveis queimaduras;
- Descartar seguindo normas e rotinas da instituição de saúde;
- Recomenda-se o uso dentro de 15 dias após abertura da embalagem;
- Uso único. Não estéril.

### Condições de armazenamento

- Armazenar em local apropriado, com umidade controlada e temperatura entre 10°C a 40°C;
- Não armazene ao abrigo de poeira e umidade;
- Não armazenar sob luz solar direta. Evitar exposição prolongada ao calor ou frio;
- Manter em local fresco e seco;
- O transporte deve seguir os mesmos requisitos de armazenamento.

### Apresentação do produto

Embalagem primária: Acondicionadas 50 eletrodos em embalagem de papel alumínio seladas individualmente.



<b>Validade</b>
2 anos
Após aberto: 30 dias

Modelo	Formato	Indicação	Qtd. Pacote	Qtd. Caixa Master
Eletrodo Descartável Neonatal/Pediátrico (SF16)	Redondo	Neonatal/Pediátrico	50 Peças	40 pacotes (2.000 peças)
Eletrodo Descartável Adulto (SF63)	Retângulo/Quadrado	Adulto	50 Peças	40 pacotes (2.000 peças)
Eletrodo Descartável Neonatal/Pediátrico (SF89)	Redondo com aba	Neonatal/Pediátrico	50 Peças	40 pacotes (2.000 peças)
Eletrodo Descartável Adulto (SF05)	Gota	Adulto	50 Peças	40 pacotes (2.000 peças)
Eletrodo Descartável Adulto (SF67)	Retângulo/Quadrado	Adulto	50 Peças	40 pacotes (2.000 peças)
Eletrodo Descartável Neonatal (SF41)	Gota	Neonatal	50 Peças	40 pacotes (2.000 peças)

Utilize um leitor QR Code no seu celular.



Rua Domingos Rampelotti, 3501  
Módulo 08 A e B - São Roque - Itajaí/SC  
CEP: 88317-600  
CNPJ: 10.842.393/0001-34

Canais de atendimento ao cliente:  
E-mail: [sac@livehs.com.br](mailto:sac@livehs.com.br)  
Telefone: 0800 591 2824